


LÖWENSTEIN
medical



CARA



Fremragende søvn.

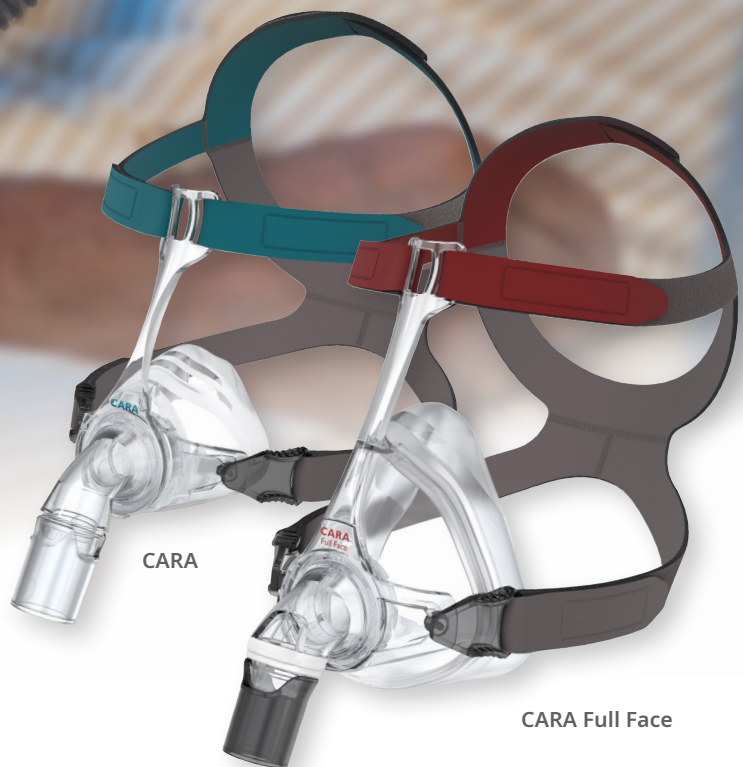

CARA

CARA Full Face

CARA. Fremragende søvn.

Perfekt pasform, høj bærekomfort, behagelig og støjsvag udånding samt god hudkompatibilitet – Nasal- og mund-næse-masken i CARA-familien perfektionerer disse krav på moderne vis.

Vores succesfulde CARA-masker overbeviser med deres **lethed, den blødt tætsluttende og nøjagtig tilpassede maskepude, de gode indstillingsmuligheder** samt andre fiffige detaljer. CARA byder på den rigtige løsning til stort set alle maskebrugere.

Maskepude nøjagtig tilpasset og stabil

Det første indtryk passer. Maskepuden er blød, elastisk og tætsluttende. Alligevel sidder den stabilt på ansigtet og tilpasser sig nøjagtigt til de pågældende konturer – optimalt med henblik på en langvarig bærekomfort selv uden pandepolster.

Gennemprøvet perfektionering – uovertruffen støjsvag

Det spalteformede udåndingssystem tæt på kugleleddet er gennemprøvet gennem årtier. CARA-familien perfektionerer dette. Færre dele gør håndteringen nemmere, reducerer vægten og skåner miljøet på grund af mindre materialeproduktion og -bortskaffelse.

Der opretholdes en diffus bortstrømning, så hverken patienten eller sengepartneren forstyrres, samt et lukket område foroven, så der ikke strømmer luft i retning af øjnene.

CARA er prisbelønnet

CARA har ikke kun overbevist dig, den er blevet belønnet med internationalt anerkendte designpriser såsom Focus Open og German Design Award.



DESIGN
AWARD
2020



Focus Open 2018
Special Mention

BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Så nem er masken at tage på.



Løsn de to clips fra masken.



Stryg hovedbåndet over dit hoved.



Fastgør clipsene nederst på masken.



Indstil de øverste hovedbånd så løst som muligt, men også så fast som nødvendigt.



Farvekodet hovedbånd
– farvet område
(petrol eller syrah) foroven

Blød og tætsluttende
maskepude – i 3 størrelser

Udlørsnor til
hurtig afmontering

Ekstremt
belastbart
materiale

Valg mellem
indføring eller
fast montering

Støjsvagt og diffust
udåndingssystem

Kugleled med 360°-
og 3D-drejning
sikrer grænseløs
bevægelsesfrihed



Indstil ligeledes de nederste
hovedbånd så løst som
muligt, men også så fast
som nødvendigt.



Indstil hovedbåndet på hovedet,
så det ikke kolliderer med øre-
flipperne foruden.



Indstil pandestøtten så
løst som muligt. Den skal
ikke slutte tæt.



Vores brugervideo kan
findes på YouTube.

Reservedele



**Hovedbånd
CARA**
inkl. båndclips
XS: WM 25191
Standard: WM 25192



**Hovedbånd
CARA Full Face**
inkl. båndclips
WM 25243



**XL-hovedbånd
CARA/CARA Full Face**
uden båndclips
WM 25338



**Maskepude
CARA**
Str. XS: WM 25189
Str. S/M: WM 25238
Str. M/L: WM 25239



**Maskepude
CARA Full Face**
Str. S: WM 25601
Str. M: WM 25602
Str. L: WM 25603



**Udløssersnor
CARA Full Face**
WM 25623

Yderligere informationer om vores terapiløsninger, tilbehør og maskesystemer findes på loewensteinmedical.com

Tekniske data

	CARA	CARA Full Face		CARA	CARA Full Face
Produktklasse iht. forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr	II a	II a	Strømningsmodstand • ved 50 l/min • ved 100 l/min	0,2 hPa 0,9 hPa	0,15 hPa 0,5 hPa
Mål (B x H x D)	72 x 112 x 70 mm (størrelse XS) 72 x 117 x 70 mm (størrelse S/M) 72 x 118 x 70 mm (størrelse M/L)	93 x 145 x 89 mm (størrelse S) 95 x 160 x 90 mm (størrelse M) 95 x 174 x 91 mm (størrelse L)	Strømningsmodstand nødudåndningsventil • inspiration ved 50 l/min • eksspiration ved 50 l/min	- -	0,6 hPa 0,8 hPa
Vægt	58 g (størrelse XS) 59 g (størrelse S/M) 60 g (størrelse M/L)	93 g (størrelse S) 97 g (størrelse M) 102 g (størrelse L)	Aktiveringstryk nødudåndningsventil • åbn: • luk:	- -	0,5 hPa 2,2 hPa
Dødrumsvolumen	74 ml (størrelse XS) 76 ml (størrelse S/M) 79 ml (størrelse M/L)	180 ml (størrelse S) 219 ml (størrelse M) 244 ml (størrelse L)	Angivet støjemissionsværdi iht. ISO 4871: • lydtryksniveau: • lydeffektniveau: • usikkerhedsfaktor:	18 dB(A) 26 dB(A) 3 dB(A)	19 dB(A) 27 dB(A) 3 dB(A)
Terapitryk	4 hPa - 30 hPa	4 hPa - 25 hPa	Levetid	5 år	5 år
Slangetilslutning, konus iht. EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (han)	Ø 22 mm (han)	Brugsvarighed	op til 12 måneder ¹	op til 12 måneder ¹
Temperaturområde • drift • opbevaring	+5 °C til +40 °C -20 °C til +70 °C	+5 °C til +40 °C -20 °C til +70 °C	Anvendte standarder	EN ISO 17510: 2020	EN ISO 17510: 2020

¹ De materialer, som bruges til fremstilling af masker, ældes, hvis de f.eks. udsættes for aggressive rengøringsmidler. I enkelte tilfælde kan det derfor være nødvendigt at udskifte maskedelene tidligere.

Apparatbetegnelse	Str.	Artikelnr.
CARA Nasal	XS	WM 25590
CARA Nasal	S/M	WM 25600
CARA Nasal	M/L	WM 25610
CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Full Face	L	WM 25650

CE 0197



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Tyskland
T. +49 40 54702-0
F. +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.com

Hovedkvarter
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Tyskland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

