


LÖWENSTEIN
medical



CARA



Śpij zdrowo.

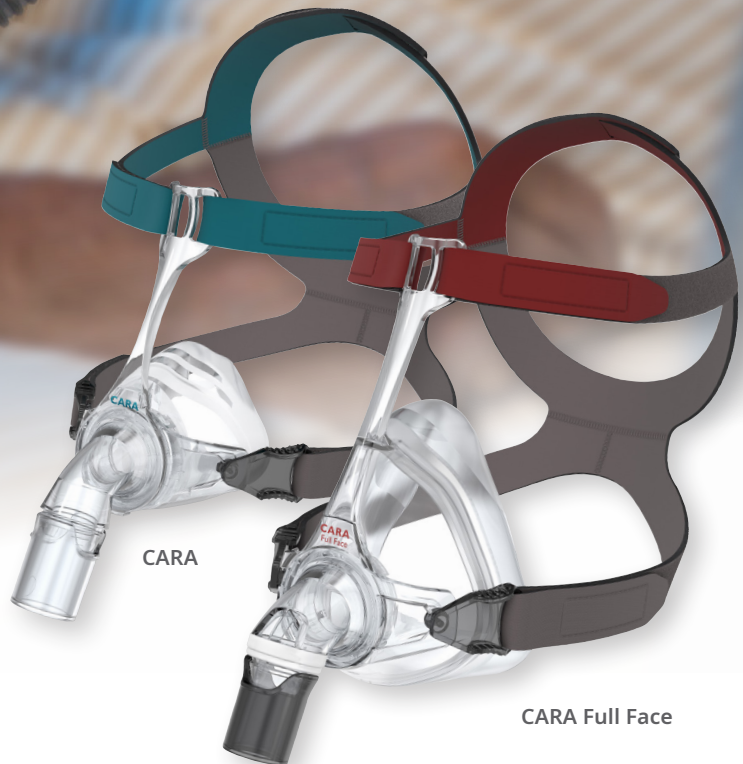

CARA

CARA Full Face

CARA. Śpij zdrowo.

Nowoczesne maski oddechowe z rodziny CARA (nosowe, pełnotwarzowe) to połączenie wygody z jakością wykonania. Każda z masek zapewnia precyzyjne dopasowanie, doskonały komfort noszenia bez szkody dla skóry, jak również ciche użytkowanie.

Maski CARA zyskują coraz większą popularność i uznanie dzięki swojej **lekkości, miękkim i wygodnym poduszkom** oraz **regulowanym zestawom mocującym**, odpowiedzialnym za **właściwe dopasowanie**.

Linia produktów CARA to przemyślane rozwiązania, spełniające oczekiwania niemal każdego użytkownika maski oddechowej.

Poduszka maski – stabilna i idealnie dopasowana

Miękka, wygodna poduszka dopasowuje się dokładnie do twarzy i obejmuje jej kontury, zapewniając długi komfort noszenia maski nawet bez poduszki czołowej.

Przemyślane rozwiązania i troska o środowisko

System wydechowy umiejscowiony w pobliżu przegubu kulkowego sprawdził się już w trakcie wielu lat stosowania. W rodzinie masek oddechowych CARA system ten został dodatkowo udoskonalony. Mniejsza ilość zastosowanych elementów upraszcza jego stosowanie i zmniejsza całkowity ciężar. Co więcej, ograniczenie materiałów wymagających wyprodukowania i utylizacji to dodatkowa korzyść dla środowiska.

Polegaj na najlepszych – delektuj się ciszą

System wydechowy maski CARA to także rozproszony przepływ powietrza, który nie przeszkadza pacjentowi i śpiącej z nim osobie. Ponadto zamknięta część górna sprawia, że powietrze nie dmucha użytkownikowi w oczy.

Maska CARA wielokrotnie wyróżniona

Maska oddechowa CARA Nasal została doceniona przez wielu ekspertów i użytkowników. Maska otrzymała międzynarodowe wyróżnienia, takie jak Focus Open czy German Design Award.



Focus Open 2018
Special Mention
BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Założysz i dopasujesz ją z łatwością.



1
Poluzuj oba zatrzaski maski.



2
Wciśnij zestaw mocujący maski na głowę.



3
Zamknij dolne zatrzaski maski.



4
Wyreguluj górną część zestawu mocującego tak, by była możliwie jak najluźniejsza, a jednocześnie jak najszczelniej dopasowana.



Kodowane barwnie zestawy mocujące –
kolorowa (zielonkawa lub brązowa)
część na górze

Miękka, wygodna poduszka maski
w trzech rozmiarach

Linka zrywająca do
szybkiego zdejmowania

Niezwykle
wytrzymały
materiał

Opcja ręcznego
zakładania lub
permanentnego
montażu

Cichy, rozproszony
system wydechowy

Przegub kulkowy o zakresie
obrotu 360° i 3D zapewniający
swobodę ruchów



Wyreguluj dolną część
zestawu mocującego w
taki sam sposób (by była
możliwie jak najluźniejsza,
a jednocześnie jak
najszczelniej dopasowana).



Umieść uprząż maski na głowie
tak, by jej dolna część nie dotyka-
ła płatków uszu.



Wyreguluj podpórkę czoło-
wą możliwie jak najluźniej,
bez dociskania czoła.



Nasz film instruktażowy
znajdziesz na YouTube.

Części zamienne



Zestaw mocujący CARA
wł. z zatrzaskami taśm podtrzymujących
XS: WM 25191
Standard: WM 25192



Zestaw mocujący CARA Full Face
wł. z zatrzaskami taśm podtrzymujących
WM 25243



Zestaw mocujący XL CARA/CARA Full Face
bez zatrzasków taśm podtrzymujących
WM 25338



Poduszka maski CARA
Rozmiar XS: WM 25189
Rozmiar S/M: WM 25238
Rozmiar M/L: WM 25239



Poduszka maski CARA Full Face
Rozmiar S: WM 25601
Rozmiar M: WM 25602
Rozmiar L: WM 25603



Linka zrywająca CARA Full Face
WM 25623

Więcej informacji na temat naszych systemów terapeutycznych, akcesoriów i masek oddechowych znajdziesz na stronie loewensteinmedical.com

Dane techniczne

	CARA	CARA Full Face		CARA	CARA Full Face
Kategoria produktu wg normy 93/42/EWG	II a	II a	Opór przepływu • at 50 l/min • at 100 l/min	0,2 hPa 0,9 hPa	0,15 hPa 0,5 hPa
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	72 x 112 x 70 mm (rozmiar XS) 72 x 117 x 70 mm (rozmiar S/M) 72 x 118 x 70 mm (rozmiar M/L)	93 x 145 x 89 mm (rozmiar S) 95 x 160 x 90 mm (rozmiar M) 95 x 174 x 91 mm (rozmiar L)	Opór przepływu, awaryjny zawór wydechowy • Wdech przy 50 l/min • Wydech przy 50 l/min	- -	0,6 hPa 0,8 hPa
Ciężar	58 g (rozmiar XS) 59 g (rozmiar S/M) 60g (rozmiar M/L)	93 g (rozmiar S) 97 g (rozmiar M) 102 g (rozmiar L)	Poziom ciśnienia akustycznego, awaryjny zawór wydechowy • Otwieranie: • Zamykanie:	- -	0,5 hPa 2,2 hPa
Przestrzeń martwa	74 ml (rozmiar XS) 76 ml (rozmiar S/M) 79 ml (rozmiar M/L)	180 ml (rozmiar S) 219 ml (rozmiar M) 244 ml (rozmiar L)	Deklarowane dwucyfrowe wartości emisji dźwięku określone w normie ISO 4871: • Poziom ciśnienia akustycznego: 18 dB(A) • Poziom mocy akustycznej: 26 dB(A) • Współczynnik niepewności: 3 dB(A)		19 dB(A) 27 dB(A) 3 dB(A)
Ciśnienie terapeutyczne	4 hPa - 30 hPa	4 hPa - 25 hPa	Przydatność do użycia	5 lat	5 lat
Łącznik: stożek zgodny z normą EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (wtyk)	Ø 22 mm (wtyk)	Okres użytkowania	do 12 miesięcy ¹	do 12 miesięcy ¹
Przedział temperatur • Praca • Przechowywanie	+5°C do +40°C -20°C do +70°C	+5°C do +40°C -20°C do +70°C	Zastosowane normy	EN ISO 17510: 2020	EN ISO 17510: 2020

¹ Materiały wykorzystywane w produkcji masek oddechowych mogą ulegać przedwczesnemu zatarzeniu w przypadku narażenia na działanie agresywnych środków czyszczących.
W takiej sytuacji może być konieczna wcześniejsza wymiana maski.

Nazwa produktu	Rozmiar	Nr art.
CARA Nasal	XS	WM 25590
CARA Nasal	S/M	WM 25600
CARA Nasal	M/L	WM 25610
CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Full Face	L	WM 25650

CE 0197



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Niemcy
T. +49 40 54702-0
F. +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.com

Siedziba główna
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Niemcy
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

