



Hinweise zur hygienischen Aufbereitung von Löwenstein Medical Beatmungsgeräten bei Patientenwechsel im Klinikbereich

VENTIlogic LS · VENTIlogic plus
 prisma VENT30 · prisma VENT40 · prisma VENT50 · prisma VENT50-C
 prisma30ST · prisma30ST-C

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie das Beatmungsgerät **AUSSCHLIESSLICH** mit Geräte-Bakterienfilter oder HMEF-Filter.
- Dieses Merkblatt bezieht sich nur auf die hygienische Aufbereitung und Handhabung der Beatmungsgeräte.
- Folgen Sie bei der Verwendung von Reinigungs-, Desinfektions- oder Sterilisationsmitteln unbedingt den Anweisungen der Hersteller dieser Mittel.
- Bitte beachten Sie für das Zubehör (wie z.B. Schläuche und Filter) die entsprechenden Gebrauchsanweisungen und Angaben zur Standzeit bzw. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation vom Hersteller.
- Einmalartikel sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und anschließend zu entsorgen – bereiten Sie diese nicht wieder auf.

Maßnahmen bei Patientenwechsel



Wischdesinfektion
 des Außengehäuses
 (z.B. mit terralin® protect)



Austausch

- des Geräte-Bakterienfilters oder HMEF
- ggf. Luft- und Pollenfilter
- des Schlauchsystems bzw. Sterilisation des Mehrweg-Schlauchsystems



Funktionsprüfung



Wenn das Therapiegerät ohne Geräte-Bakterienfilter oder Filter (Luft- und Pollenfilter) betrieben wurde, oder eine nachgewiesene Kontamination der luftführenden Teile innerhalb des Gerätes mit kritischen Keimen (MRSA, 3MRGN, etc.) vorliegt, muss die hygienische Aufbereitung **durch den Hersteller oder einen autorisierten Fachhandelspartner erfolgen!**

