



Comment nettoyer mon masque?

CARA ¹
JOYCEeasy ²

JOYCEone ³
JOYCE

JOYCE SilkGel



Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois*

Cycle de nettoyage	quotidien		
	hebdomadaire		
Pièces	à la main dans de l'eau chaude et du savon	lave-vaisselle jusqu'à 65 °C	machine à ultrasons** jusqu'à 80°C
douille rotative	✓	✓	✓
harnais avec attaches	✓	–	–
coque du masque	✓	✓	✓
jupe du masque	✓	✓	✓
jupe du masque SilkGel	✓	✓	–
anneau de sécurité	✓	✓	✓
coussinet frontal	✓	✓	✓
coussinet frontal SilkGel	✓	✓	–
cale frontale	✓	✓	✓
bouchon de raccord	✓	✓	✓
raccord cousé	✓	✓	✓

NP 15 ⁴



Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois*

Cycle de nettoyage	quotidien		
	hebdomadaire		
Pièces	à la main dans de l'eau chaude avec un nettoyant ménager doux	lave-vaisselle jusqu'à 65 °C	machine à ultrasons** jusqu'à 80°C
douille rotative	✓	✓	✓
harnais avec attaches	✓	–	–
coque du masque	✓	✓	✓
tuyau du masque	✓	✓	✓
bulle narinaire	✓	✓	✓
clip attache-tuyau	✓	✓	✓
boucle attache-tuyau	✓	–	–
coussinet frontal	✓	✓	✓
bouchon de raccord	✓	✓	✓
raccord cousé	✓	✓	✓

Masques bucco-nasaux

CARA Full Face ⁵

JOYCEasy Full Face

JOYCEeasy next FF ⁶

JOYCEone Full Face ⁷

JOYCE Full Face

JOYCE Full Face SilkGel

JOYCE Full Face^{plus}

Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois*

Cycle de nettoyage	hebdomadaire		
	quotidien	lave-vaisselle jusqu'à 65 °C	machine à ultrasons** jusqu'à 80°C
Pièces	à la main dans de l'eau chaude et du savon		
douille rotative	✓	✓	✓
harnais avec attaches	✓	–	–
coque du masque	✓	✓	✓
jupe du masque	✓	✓	✓
jupe du masque SilkGel	✓	✓	–
valve d'expiration d'urgence	✓	–	✓
sangle d'ouverture rapide	✓	–	✓
anneau de sécurité	✓	✓	✓
coussinet frontal	✓	✓	✓
coussinet frontal SilkGel	✓	✓	–
cale frontale	✓	✓	✓
bouchon de raccord	✓	✓	✓
raccord cousu	✓	✓	✓



Accessoires

Silentflow 2 ⁸

Durée d'utilisation 6 à 12 mois*

Noise suppressor ⁹

Durée d'utilisation jusqu'à 3 mois*

Cycle de nettoyage	hebdomadaire		
	à la main dans de l'eau chaude et du savon	lave-vaisselle jusqu'à 65 °C	machine à ultrasons** jusqu'à 80°C
Pièces			



Silentflow 2

raccord manchon	✓	✓	✓
partie centrale	✓	✓	✓

Silencieux

manchon	avec de l'eau claire	–	✓
filtre poreux		–	✓
élément de jonction		–	✓

Remarques générales :

Cette notice explicative ne remplace pas les modes d'emploi disponibles pour chaque produit.

- * Les matériaux utilisés pour la fabrication des masques s'usent plus rapidement, s'ils sont par exemple nettoyés avec des détergents agressifs. Dans certains cas, il est donc fortement recommandé de changer régulièrement de masque.
- ** Le nombre de 30 cycles a été validé par Löwenstein Medical avec l'appareil à ultrasons HAHN & KOLB type USR 58/H. Le nettoyage par ultrasons doit être effectué à 80 °C maximum, pour une durée maximale de 10 minutes. Après avoir nettoyé les pièces, les rincer soigneusement à l'eau claire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis les sécher.



CE 0197



© Tous droits réservés.
Toute reproduction est soumise à autorisation préalable et expresse de la société Löwenstein Medical.

Löwenstein Médical France
Z.I. 5 Rue Lavoisier, 91430 Igny
France
T: +33 | 69 35 53 35
F: +33 | 64 54 81 94
info@loewensteinmedical.fr
www.loewensteinmedical.fr

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg
Allemagne
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

