



Comment nettoyer mon masque?

CARA ¹
JOYCEeasy ²

JOYCEone ³
JOYCE SilkGel



Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois*

Pièces	Cycle de nettoyage		
	quotidien	hebdomadaire	
	à la main dans de l'eau chaude et du savon	lave-vaisselle jusqu'à 65 °C	machine à ultrasons** jusqu'à 80 °C
coude rotatif	✓	✓	✓
harnais avec attaches	✓	–	–
coque du masque	✓	✓	✓
jupe du masque	✓	✓	✓
jupe du masque SilkGel	✓	✓	–
anneau de sécurité	✓	✓	✓
coussinet frontal	✓	✓	✓
coussinet frontal SilkGel	✓	✓	–
cale frontale	✓	✓	✓
bouchon de raccord	✓	✓	✓
raccord coudé	✓	✓	✓

Silentflow 2 ⁷ Durée d'utilisation 6 à 12 mois*

Noise suppressor ⁸ Durée d'utilisation jusqu'à 3 mois*



Pièces	Cycle de nettoyage		
	à la main dans de l'eau chaude et du savon	lave-vaisselle jusqu'à 65 °C	machine à ultrasons** jusqu'à 80 °C
Silentflow 2			
raccord manchon	✓	✓	✓
partie centrale	✓	✓	✓
Silencieux			
manchon	avec de l'eau claire	–	✓
filtre poreux		–	✓
élément de jonction		–	✓

CARA Full Face ⁴
 JOYCEeasy Full Face
 JOYCEeasy next FF ⁴

JOYCEone Full Face ⁶
 JOYCE Full Face SilkGel

Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois*

Cycle de nettoyage	hebdomadaire		
	quotidien	lave-vaisselle jusqu'à 65 °C	machine à ultrasons** jusqu'à 80 °C
Pièces	à la main dans de l'eau chaude et du savon		
coude rotatif	✓	✓	✓
harnais avec attaches	✓	–	–
coque du masque	✓	✓	✓
jupe du masque	✓	✓	✓
jupe du masque SilkGel	✓	✓	–
valve d'expiration d'urgence	✓	–	✓
sangle d'ouverture rapide	✓	–	✓
anneau de sécurité	✓	✓	✓
coussinet frontal	✓	✓	✓
coussinet frontal SilkGel	✓	✓	–
cale frontale	✓	✓	✓
bouchon de raccord	✓	✓	✓
raccord coudé	✓	✓	✓



Remarques générales :

Cette notice explicative ne remplace pas les modes d'emploi disponibles pour chaque produit.

- * Les matériaux utilisés pour la fabrication des masques s'usent plus rapidement, s'ils sont par exemple nettoyés avec des détergents agressifs. Dans certains cas, il est donc fortement recommandé de changer régulièrement de masque.
- ** Le nombre de 30 cycles a été validé par Löwenstein Medical avec l'appareil à ultrasons HAHN & KOLB type USR 58/H. Le nettoyage par ultrasons doit être effectué à 80 °C maximum, pour une durée maximale de 10 minutes. Après avoir nettoyé les pièces, les rincer soigneusement à l'eau claire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis les sécher.



CE 0197



© Tous droits réservés.
Toute reproduction est soumise à autorisation préalable et expresse de la société Löwenstein Medical.

Löwenstein Médical France
Z.I. 5 Rue Lavoisier, 91430 Igny
France
T: +33 | 69 35 53 20
F: +33 | 64 54 81 94
info@loewensteinmedical.fr
www.loewensteinmedical.fr

